

Colle Chirurgicale Référence : VETColle Chir

Flacon 2.5ml

Bonne visibilité grâce à sa coloration bleue, agit en quelques secondes.

Colle tissulaire N-butyl cyanoacrylate pour fermeture de plaie

Protection contre les infections

Incluant 6 applicateurs

INDICATIONS :

- Fermeture de plaies – Cette colle peut être appliqué pour la fermeture des plaies après une adaptation minutieuse de la plaie comme substitut de suture, pour un soutien supplémentaire des sutures et pour la protection des infections après les sutures. Elle contient un colorant bleu pour permettre à l'utilisateur de voir facilement où le produit a été appliqué.
- Au contact du corps, l'adhésif passe de l'état liquide à l'état solide en polymérisant en quelques secondes pour sceller. L'adhésif arrête les saignements mineurs et lie les bords de la plaie. Peut éliminer le besoin de sutures/bandages. Agit également comme une barrière pour empêcher les corps étrangers de pénétrer dans la plaie. L'adhésif tissulaire est retiré à mesure que la cicatrisation se produit.

Précautions et avertissements :

La colle adhère à la peau et aux paupières en quelques secondes. Évitez tout contact avec les yeux et les paupières !

En cas de contact avec les yeux, maintenir les paupières ouvertes et rincer abondamment avec une solution physiologique stérile. Si une telle solution n'est pas disponible, l'œil peut être rincé à l'eau. L'application d'huiles médicales neutres stériles peut être avantageuse. Un ophtalmologiste doit être consulté immédiatement.

Évitez tout contact avec les instruments, les gants et les instruments chirurgicaux.

Ne pas utiliser en interne, sur des plaies perforantes infectées et/ou profondes, sous la couche épidermique ou sur des plaies enflammées. Appliquer uniquement sur des plaies fraîches et propres (datant de moins de 6 heures).

Maintenir les surfaces à coller aussi sèches et exemptes de graisse que possible.

Utiliser dans un endroit bien ventilé. Évitez de respirer les vapeurs pendant de longues périodes.