



NOTICE D'UTILISATION DU DERMOGRAPHE

Avant de brancher l'appareil, nous vous recommandons de lire attentivement la présente notice en vous reportant au schéma.

ALIMENTATION :

- Le tatoueur fonctionne en très basse tension obtenue à partir du bloc d'alimentation 230V/12V/1,5A (**BT**), l'interrupteur en 12 V est à pression à pied.
- L'alimentation, le câble d'alimentation et la prise ne doivent pas être immergés dans l'eau ou tout autre liquide.
- N'utilisez pas le tatoueur si celui-ci ou le câble d'alimentation sont visiblement endommagés.
- Avant de brancher le tatoueur sur le secteur, vérifiez que la tension et l'intensité nominales correspondent aux indications figurant sur l'étiquette apposée sur le tatoueur.
- Vérifiez régulièrement que la fiche et le cordon d'alimentation ne sont pas endommagés. Si le cordon d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par AC RIS Instruments Vétérinaires afin d'éviter tout risque.
- Protégez le cordon d'alimentation contre les dommages, ne tirez pas sur le cordon pour débrancher la fiche de la prise électrique.

RÉGLAGE DU DÉBIT D'ENCRE :

- Visser l'embout (**EM**) jusqu'à ce qu'apparaisse une résistance.
- Introduire alors quelques gouttes d'encre par orifice situé sous l'obturateur (bague en caoutchouc sur le petit manche) en tenant l'appareil obliquement, l'embout dirigé vers le bas.
- Fermer l'orifice en faisant glisser l'obturateur (**OB**)
- Faire fonctionner l'appareil en le tenant en position verticale et dévisser légèrement l'embout jusqu'à ce que l'encre apparaisse.
- Vous pouvez également utiliser l'appareil en trempant les aiguilles directement dans l'encre que vous aurez au préalable mis dans un contenant prévu à cet effet.

➔ **REMARQUE : LORSQUE L'APPAREIL CONTIENT DE L'ENCRE, GARDER TOUJOURS LES AIGUILLES DIRIGÉES VERS LE BAS.**

RÉGLAGE DE LA PROFONDEUR DE PÉNÉTRATION :

- Après avoir débloqué le contre-écrou (**CE**) en le vissant tout en maintenant le manchon (**MA**), régler en vissant le manchon (**MA**) pour augmenter ou en le dévissant pour diminuer. (Un tour complet correspond à une variation de pénétration de 1mm).
- Bloquer le contre écrou (**CE**).

NETTOYAGE :

- Après utilisation, ouvrir l'obturateur (**OB**), desserrer l'embout EM pour permettre à l'excédent d'encre de s'écouler, pour faciliter l'écoulement mettre en marche le tatoueur et rincer avec de l'alcool si nécessaire. (Ne pas laisser d'encre dans l'appareil).

Lors du rangement de l'appareil, veiller à ce que les aiguilles ne dépassent pas de l'embout. Ceci peut être obtenu, soit en arrêtant l'appareil en position aiguilles rentrées (donner des impulsions sur l'interrupteur jusqu'à ce que les aiguilles s'arrêtent dans la bonne position), soit en dévissant le manchon ou l'embout.

DÉMONTAGES AUTORISÉS :

Pour changer le faisceau d'aiguilles (**CTA**) :

- Desserrer l'embout (**EM**), débloquer le contre-écrou (**CE**) puis dévisser le manchon et retirer axialement l'ensemble : manchon + embout.
- Tirer alors axialement sur le faisceau d'aiguilles (qui est emboîté et non vissé) et le remplacer.
- Lors du remontage, visser l'embout sur le manchon, mais sans serrer, puis enfiler le manchon autour des aiguilles bien dans l'axe et visser le manchon sur la carcasse (**CAR**).
- Rebloquer le contre-écrou

➔ **REMARQUE : NE JAMAIS REMONTER LE MANCHON SUR LE MÉCANISME AVEC L'EMBOUT SERRE, LES AIGUILLES NE POUVANT PAS ALORS TRAVERSER LE DIAPHRAGME.**


CONSEILS POUR L'UTILISATION :

- Bien raser la partie à tatouer et l'enduire légèrement de vaseline. Le réglage de la profondeur de pénétration doit être tel que les aiguilles dépassent de 1.5mm minimum (la pénétration réelle est alors d'1mm environ, compte tenu de l'élasticité de la peau).
- Tendre la peau.

- Tenir le tatoueur verticalement et le déplacer pour écrire (procéder par trait continu et non par point).
- Essuyer les bavures d'encre sur la peau (le tatouage doit alors apparaître en noir, si le trait est rouge, c'est que la peau n'a pas été suffisamment tendue ou que la profondeur de pénétration est insuffisante ; Repasser alors sur les parties mal tatouées en augmentant la profondeur de pénétration).
- Ne pas hésiter à changer les aiguilles dès que l'une d'elle est émoussée : une aiguille émoussée repousse la peau et empêche donc les autres aiguilles de pénétrer.
- Pour les très petits animaux, il est possible d'obtenir un trait encore plus fin avec un faisceau de 3 aiguilles seulement (casser la 4ème aiguille à la base de la soudure).

CODE DE
REFERENCE DE
PIECES DE
RECHARGE :
3695xx

FLACON COMPTE-
GOUTTES D'ENCRE
DE 10 ML FOURNI

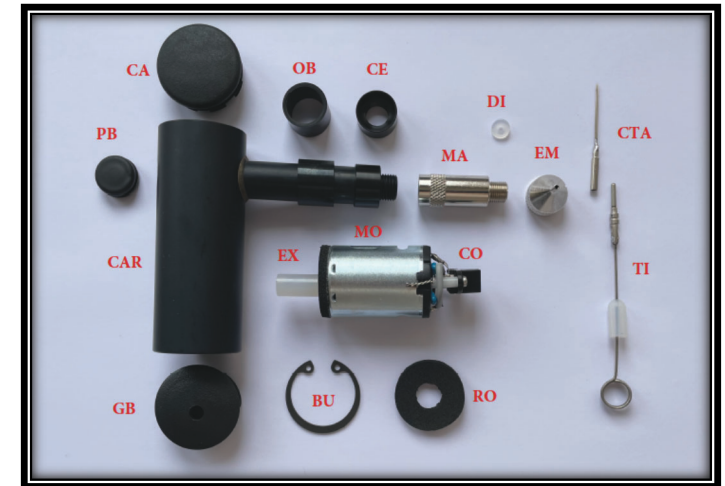

L'APPAREIL EST GARANTI 2 ANS POUR UN USAGE CONFORME A SON UTILISATION