

La collerette anti-grattage pour lapin

Collerette anti-grattage pour lapin de ne pas se gratter ou mordre ses fils. Coussin molletonner lui permet de garder son champ de vision intact comparé aux collerettes traditionnelles en plastique.

Instructions pour le nettoyage et l'entretien des collerettes :

Retirez l'insert en mousse des collerettes avant de commencer le nettoyage. Après que les collerettes soient complètement sèches, vous pouvez replacer la mousse.

1. **Pré-traitement** : Faites tremper les collerettes pendant une heure dans une solution désinfectante contenant de l'ammonium quaternaire. Cela aide à éliminer les saletés tenaces, les mauvaises odeurs et à désinfecter. Évitez l'utilisation de l'eau de Javel.
2. **Lavage** : Lavez les collerettes en machine en utilisant un détergent industriel ou une lessive classique. Vous pouvez également obtenir des résultats similaires en utilisant une machine à laver spécifique pour les cages.

Température : Utilisez de l'eau chaude pour obtenir de meilleurs résultats de nettoyage.

Séchage : Une fois la mousse retirée, les collerettes peuvent être séchées en machine.

Colliers Lapins	Poids
BC 01SPM	2.7 à 3.6kg
BC 02MMM	3.6 à 4.5kg
BC 03LGS	4.5 à 5.4Kg

